

# AND

Эй энд Ди, Япония

Инструкция по подключению тонометра UA-911BT(и весов UC-911BT) к мобильному приложению MedM Health , работе с мобильным приложением MedM Health и порталом (для смартфонов с ОС Android)

S  SWISS  
MEDMOBILE



## Введение



Вы стали обладателем телемедицинского прибора – тонометра UA-911BT (весов UC-911BT).

Теперь Ваши возможности по контролю за своим артериальным давлением и пульсом (весом) стали намного шире.

Вам больше не нужно запоминать и записывать результаты измерений на бумагу, все Ваши измерения теперь автоматически сохраняются в смартфоне и на специальном сайте в Интернет. В любое удобное время, из любой точки мира Вы можете просматривать сами, показывать врачу или родственникам результаты в виде таблиц и графиков.

Просто подключите тонометр (весы) к своему смартфону\* и будьте в безопасности!!! Специальная система уведомлений\*\* напомнит Вам о необходимости сделать измерение или обратит внимание Вашего врача на текущие результаты измерений, что позволит своевременно оказать Вам или Вашим родственникам необходимую помощь.

\* Уточните возможности Вашего смартфона по приему данных по Bluetooth в описании приложения Medm Health на Google Play Market

\*\*Специальная система уведомлений со временем может изменяться и отличаться по функциям и возможностям




# Содержание



1. Регистрация учетной записи на сайте портала MedM Health.....
2. Поиск мобильного приложения MedM Health в Google Play Store (Play Market).....
3. Установка программы MedM Health.....
4. Включение Bluetooth .....
5. Начало работы с MedM Health.....
6. Регистрация учетной записи через приложение MedM Health на смартфоне.....
7. Главное окно мобильного приложения MedM Health.....
8. Подключение прибора к смартфону (Тонометр UA-911BT).....
9. Передача данных на смартфон .....
10. Передача данных на смартфон в случае временного .....
- отсутствия смартфона под рукой.....
11. Просмотр данных на сервере хранения данных .....
12. Возможности сервера хранения данных MedM Health.....




# 1. Регистрация учетной записи на сайте портала MedM Health

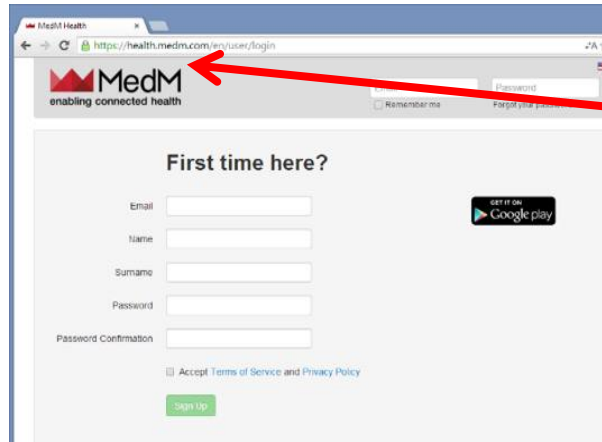


Для начала регистрации на портале MedM Health необходимо через любой браузер зайти на сайт <https://health.medm.com>.

1

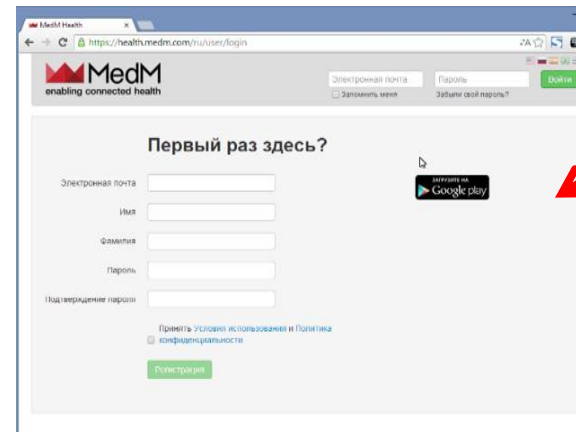


В верхнем правом углу выбираем необходимый нам язык отображения информации (Русский). После этого нажимаем пункт Зарегистрироваться

2

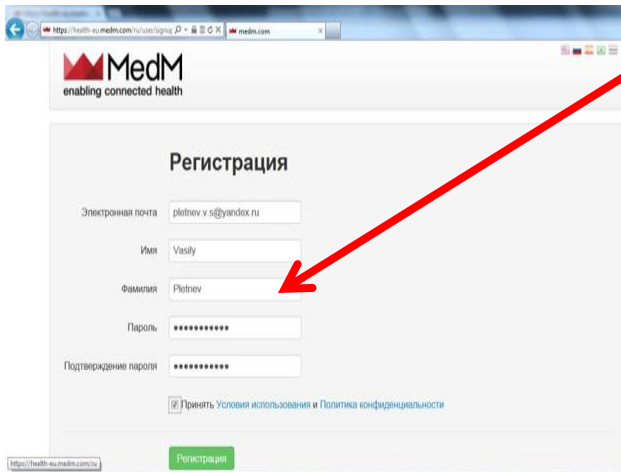

В разделе регистрации заполняем все необходимые поля и в конце нажимаем Регистрация

3

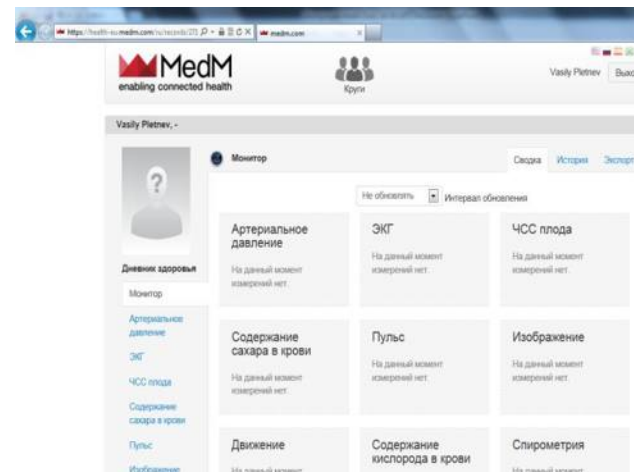

При успешной регистрации откроется главное окно Вашего профиля

4




## 2. Поиск мобильного приложения MedM Health в Google Play Store (Play Market)




Открываем приложение Play Маркет

1

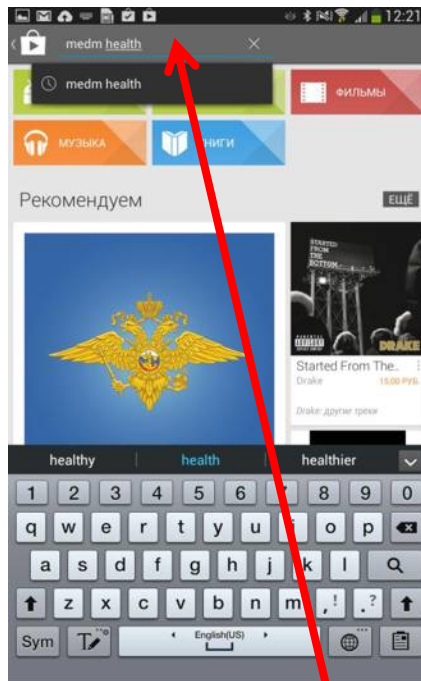

В поисковой строке набираем название программы MedM Health


2

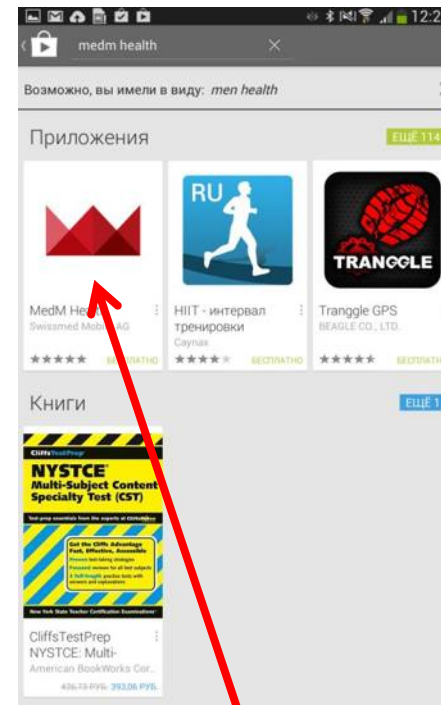

Выбираем установку приложения MedM Health


3

### 3. Установка программы MedM Health

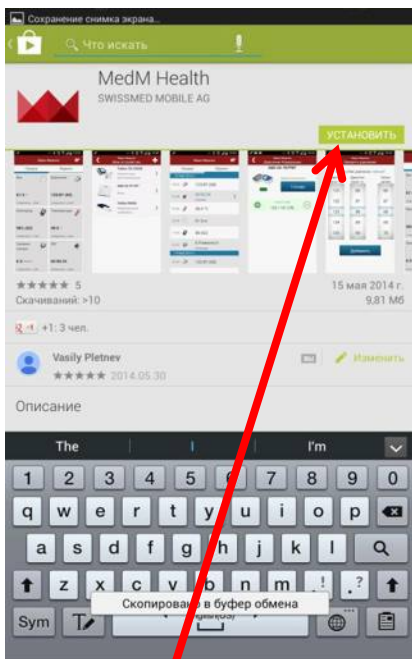


Выбираем пункт «Установить»

1

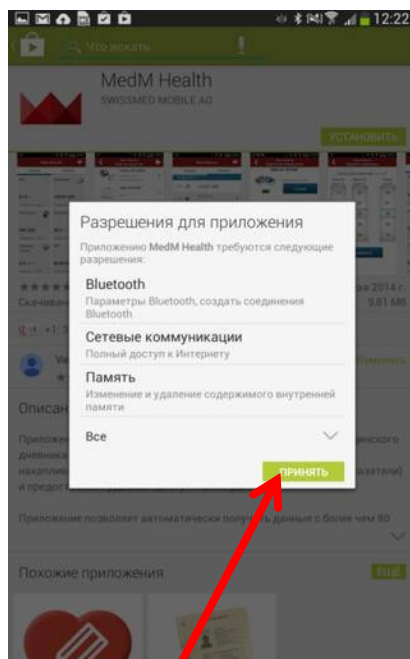


Play Market предлагает Вам принять разрешения для приложения. Выбираем пункт «Принять»

2

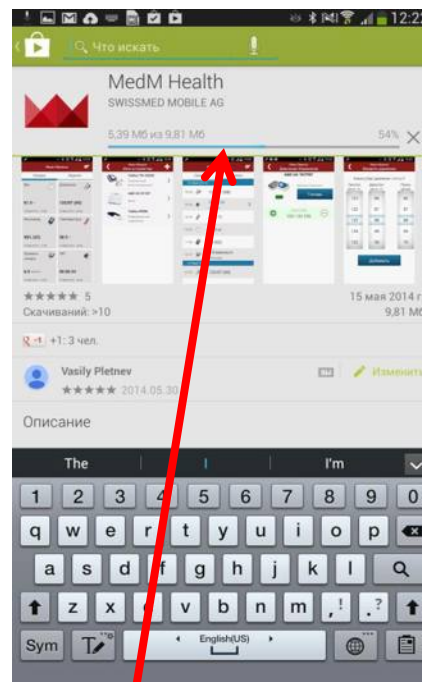

Начинается загрузка приложения

3

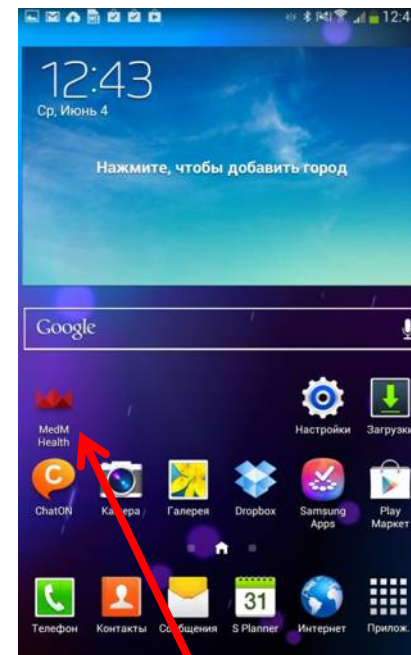


По окончании загрузки на рабочем столе телефона, должен появиться ярлык приложения MedM Health

4






## 4. Включение Bluetooth

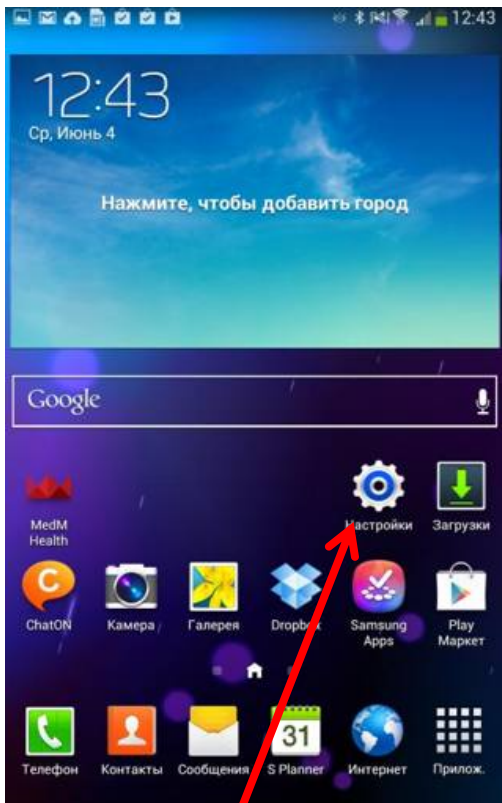


Заходим в пункт  
«Настройки»

1

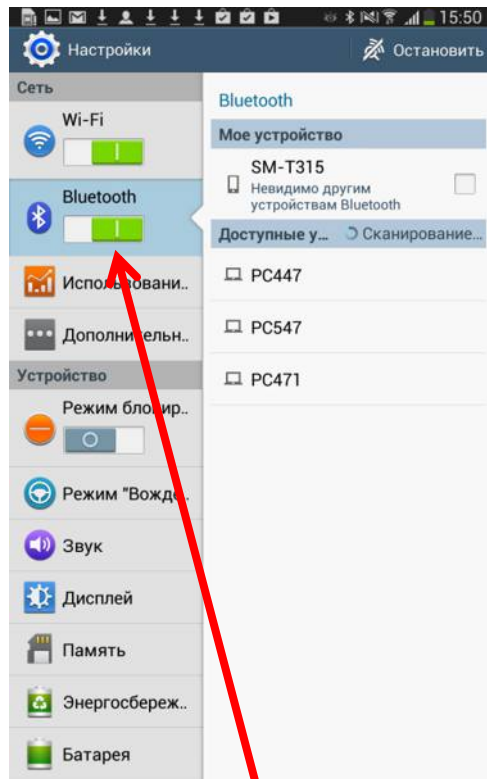

Делаем индикатор  
Bluetooth активным

2

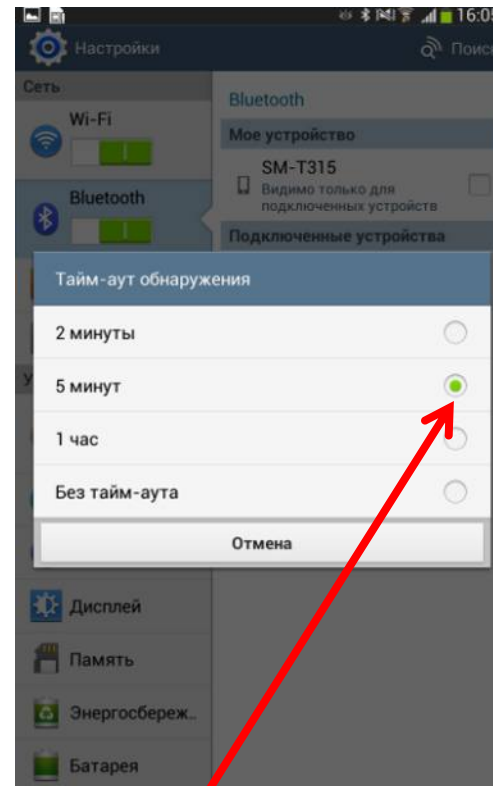


Для обеспечения надежности сопряжения  
тонометра с смартфоном установим Тайм-  
Аут обнаружения минимум 5 минут. Для  
этого необходимо нажать кнопку «Меню» на  
Вашем смартфоне, выбрать пункт «Тайм-аут  
обнаружения» и поставить галочку на 5  
минут или более

3




## 5. Начало работы с MedM Health

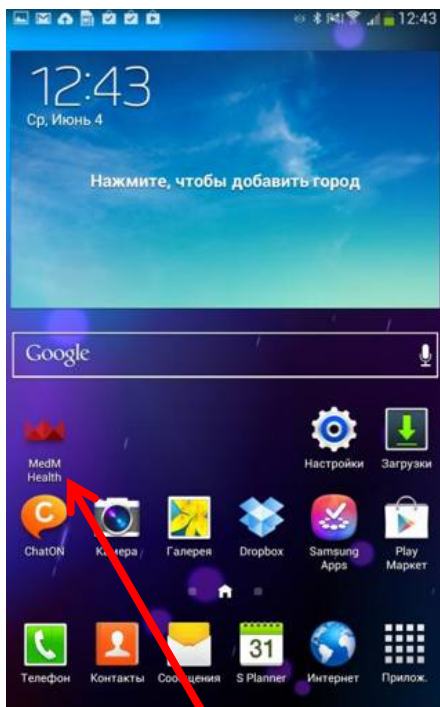

Запускаем приложение  
MedM Health

1

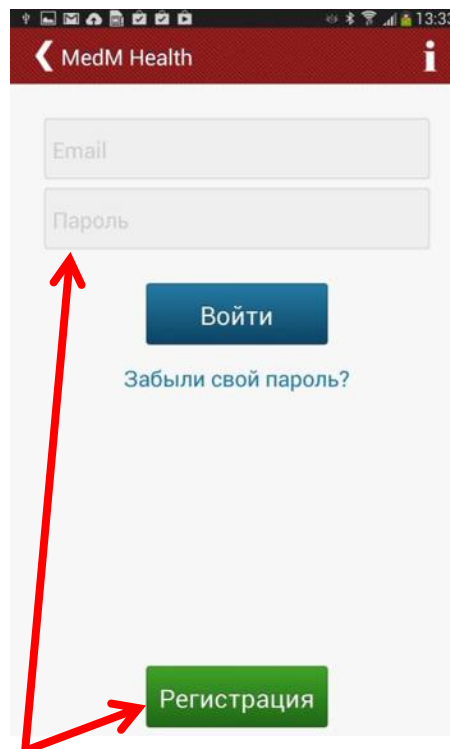

Если у Вас уже есть учетная запись данного сервиса, введите в строках E-mail и Пароль свои данные, после чего нажмите Войти. Если у Вас нет учетной записи Вы сможете зарегистрироваться 2 способами:


1. Регистрация через приложение на смартфоне
2. Регистрация через интернет на сайте <https://health.medm.com>

2






# 6. Регистрация учетной записи через приложение MedM Health на смартфоне

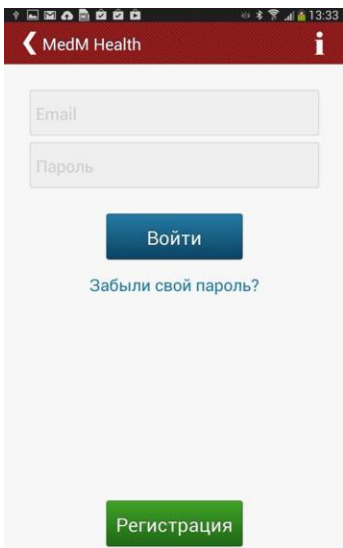


Для начала регистрации на смартфоне необходимо выбрать раздел «Регистрация»

1

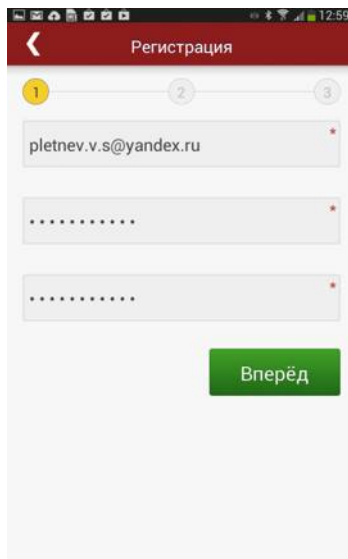


Заполняем поля E-mail и Пароль и потом ждем «Вперед»

2

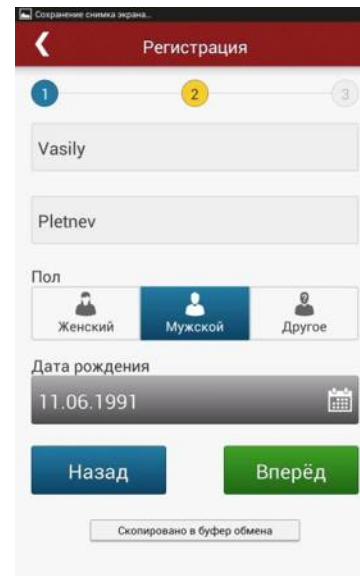


Заполняем поля Имя, Фамилия, пол, дата рождения и ждем «Вперед»

3

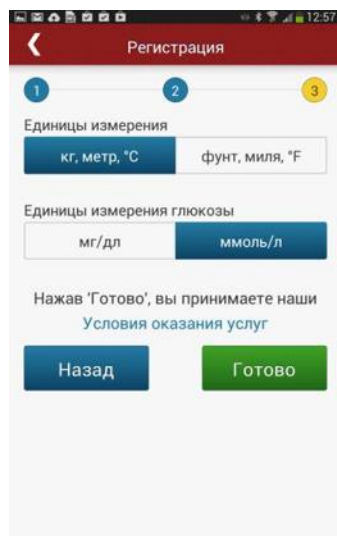

Выбираем необходимые единицы измерения и ждем «Готово»

4

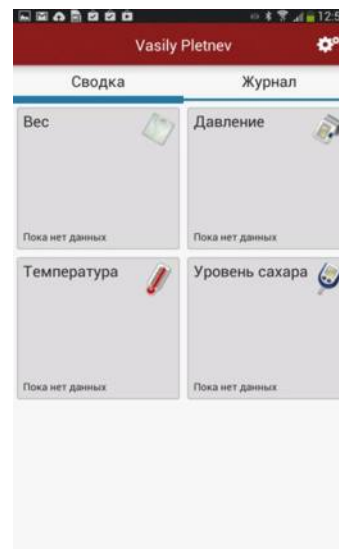


При успешной регистрации открывается главное окно программы

5



## 7. Главное окно мобильного приложения MedM Health

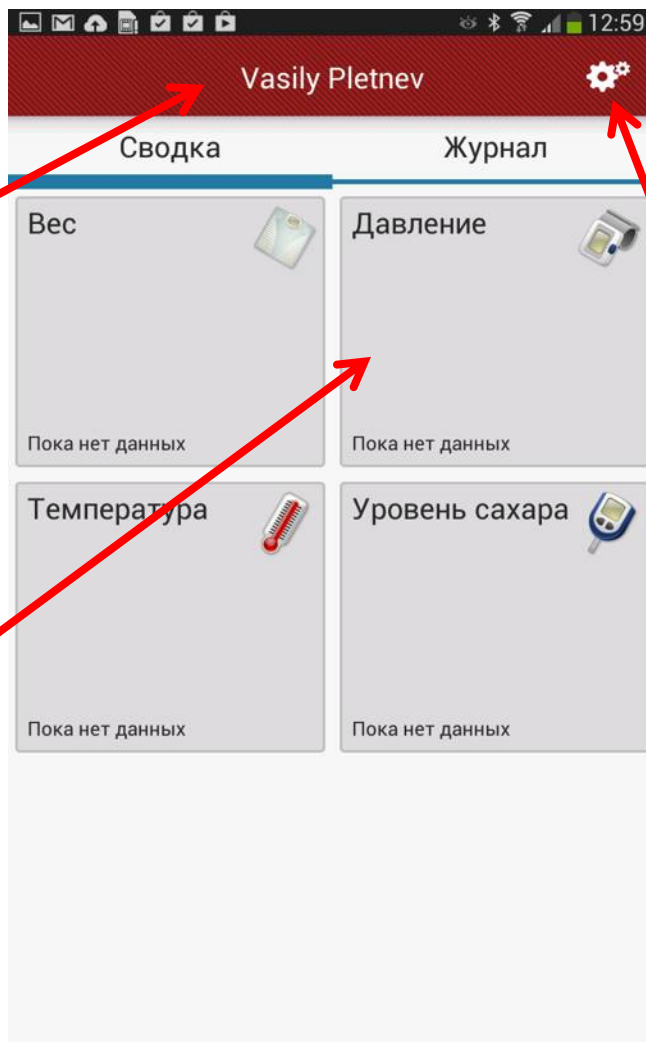


Учетная запись  
пользователя

Просмотр измерений  
и свойств прибора


Меню настроек  
программы

# 8. Подключение прибора к смартфону

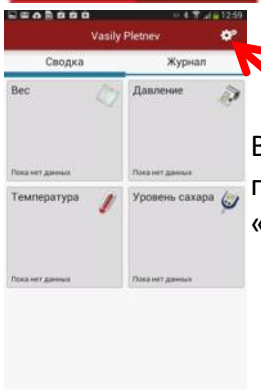


Выбираем пункт «Настройки»

1

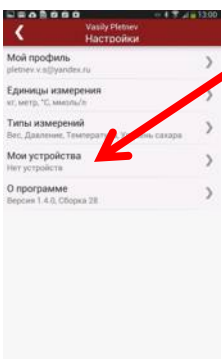


В разделе «Настройки» выбираем пункт «Мои устройства»

2

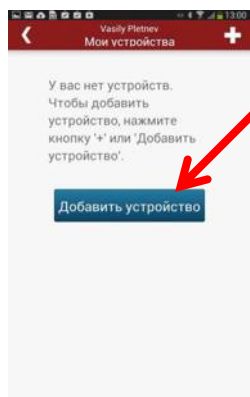


В разделе «Мои устройства» выбираем «Добавить устройство»

3

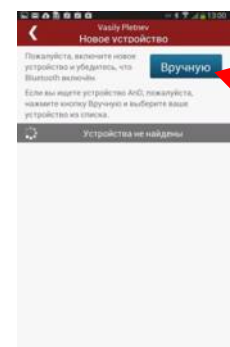


В разделе новое устройство выбираем «Вручную»

4

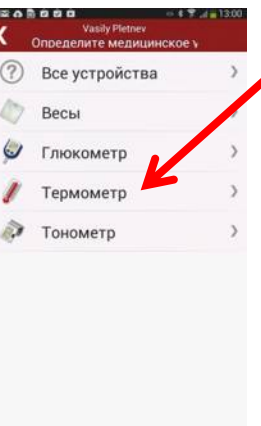


В разделе «Определите медицинское устройство» выбираем «Тонометр»

5

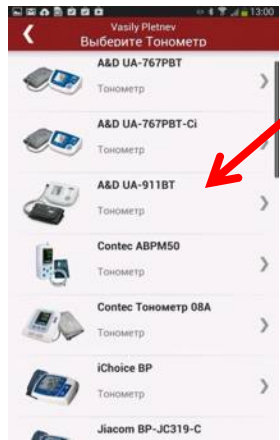


В разделе «Выберите тонометр» выбираем модель «A&D UA-911BT»

6

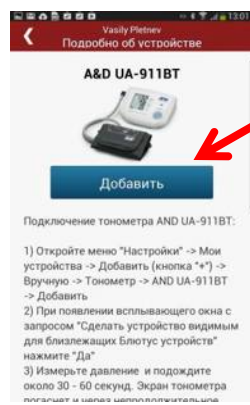


В разделе «Об устройстве» выбираем пункт «Добавить». Может появиться окно с вопросом о подключении Bluetooth и сопряжении с другими устройствами – ответьте «Да». Важно!!! В момент подключения прибора к смартфону не должно быть по близости устройств с включенным Bluetooth.

7

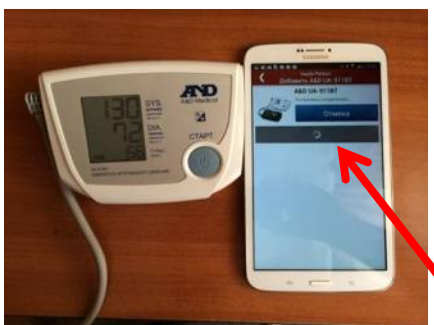

Сразу после нажатия «Добавить» начинаем делать измерение на приборе. Ожидаем около 2х минут пока программа не добавит Ваш тонометр. В процессе подключения прибора смартфон может выдать сообщение «Прибор подключен» и «Прибор Отключен». Вне зависимости от вида сообщений ожидаем подключения без действий. Программа подключит тонометр автоматически.

8

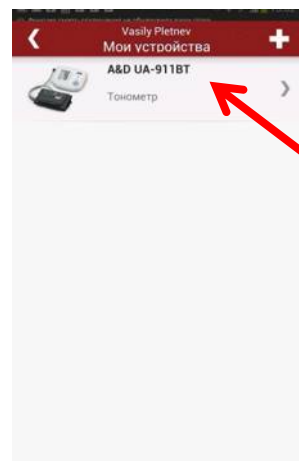


В случае успешного подключения прибора автоматически появится окно «Мои устройства» в котором будет Ваш тонометр

9




## 9. Передача данных на смартфон

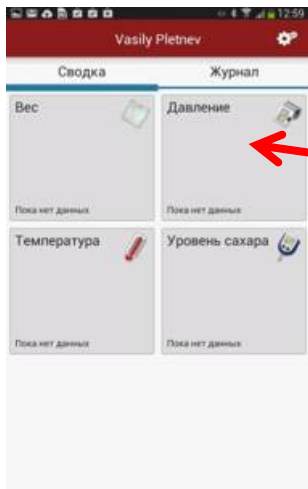

Для приема данных с тонометра на смартфон в главном окне приложения выбираем пункт «Давление»

1

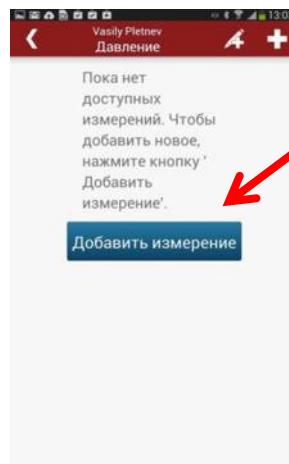


В разделе «Давление» выбираем пункт «Добавить измерение». Производим измерение на приборе и ожидаем пока данные придут на смартфон в течение 1 минуты.

2




В случае успешного приема данных появится строка с Вашими измерениями. Если Вы хотите сохранить данное измерение на смартфон, нажимаем зеленый «Плюс». Если не хотите сохранить, то красный «Минус»

3

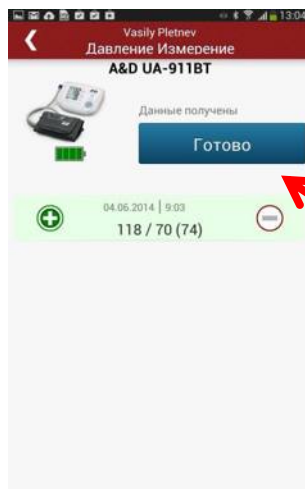

Если данные, которые пришли на смартфон, корректны, нажимаем «Готово»

4

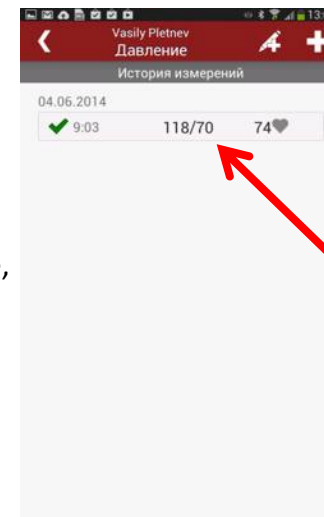


В случае успешного сохранения Ваших измерений, в окне «История измерений» Вы увидите свои данные.

5



## 10. Передача данных на смартфон в случае временного отсутствия смартфона под рукой


В случае, если у Вас не оказалось под рукой смартфона или он разряжен и выключен, находится на удалении от тонометра, а Вам необходимо сделать измерение, Ваши данные не потеряются, а сохраняться в памяти прибора. Прибор может хранить в себе последние 40 измерений и при первой возможности передать сохраненные данные в память смартфона.

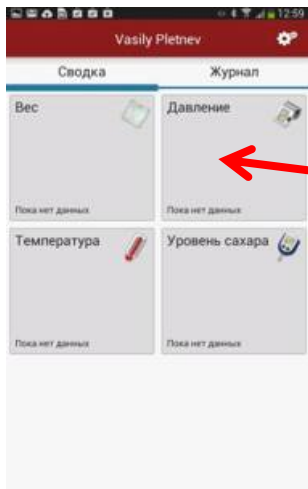

Для приема данных с тонометра на смартфон необходимо сделать 1 измерение при условии, что смартфон и прибор сопряжены.

В главном окне приложения выбираем пункт «Давление»

1

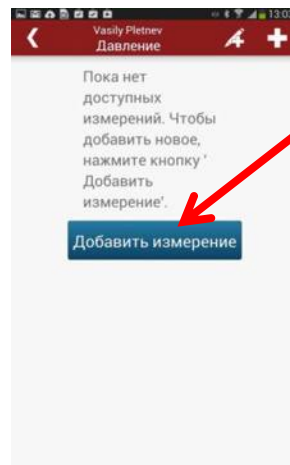

В разделе «Давление» выбираем пункт «Добавить измерение»

2




Производим измерение на приборе и ожидаем пока данные последовательно придут на смартфон. В случае успешного приема данных появится строка с Вашими сохраненными в приборе измерениями.

3



Если данные, которые пришли на смартфон, корректны, нажимаем «Готово»

4

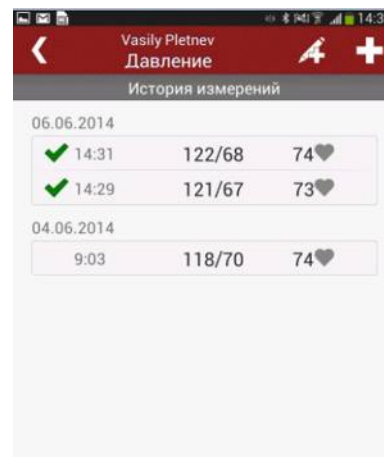

В случае успешного сохранения Ваших измерений, в окне «История измерений» Вы увидите свои данные.


5






# 11. Просмотр данных на сервере хранения данных

Если Ваш смартфон подключен к Интернет, то все полученные на смартфон измерения будут автоматически отправлены на Вашу персональную страницу на портале MedM Health

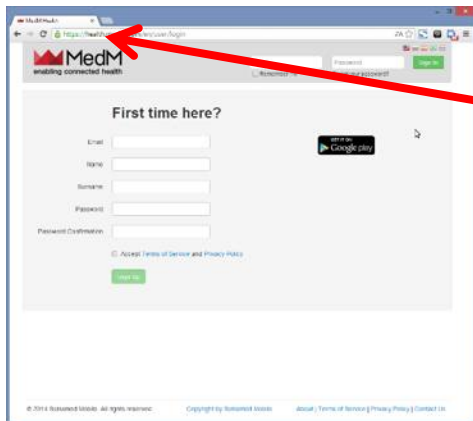


Для начала просмотра данных на сервере хранения данных необходимо зайти на сайт <https://health.medm.com>.

1

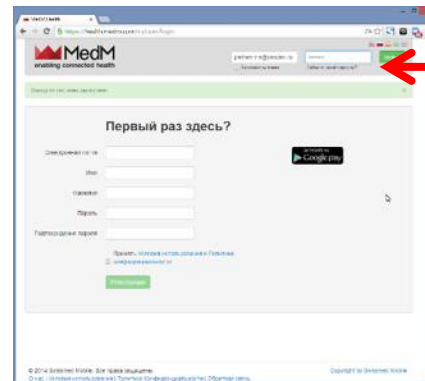


В строках Электронная почта и Пароль введите свои учетные данные и нажмите Войти

2

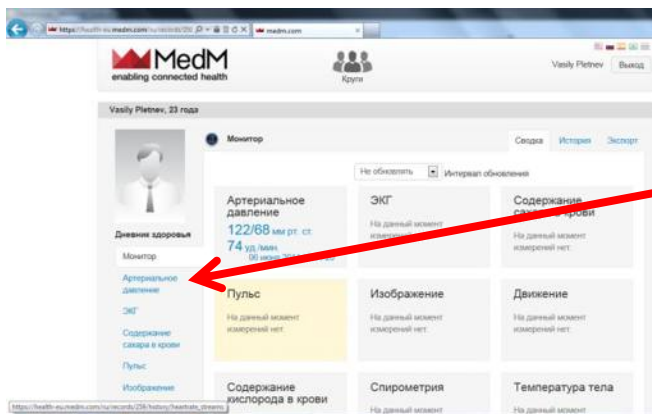

Для просмотра данных об измерениях артериального давления нажмите пункт Артериальное давление

3

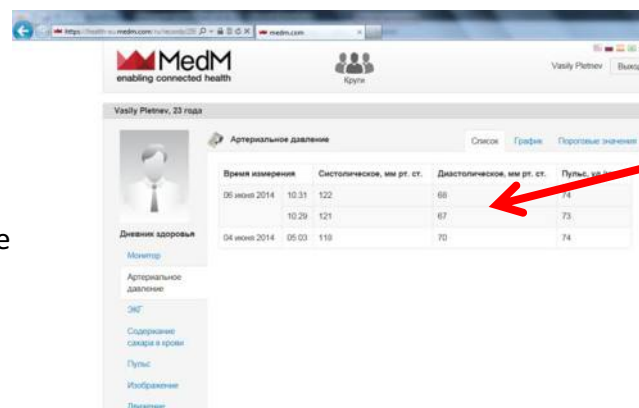

Вы сможете увидеть Ваши измерения, которые сохранились на смартфоне, в виде таблицы или в виде графика, установить пороговые значения или настроить оповещения

4





## 12. Возможности сервера хранения данных MedM Health



Раздел Круги, в котором Вы можете предоставить доступ Ваших данных своему врачу, друзьям или близким. Также Вы можете отправить им приглашение зарегистрироваться на портале MedM Health.

Раздел Артериальное давление. Вы сможете посмотреть все измерения, полученные с Вашего тонометра, построить графики с необходимым диапазоном времени, настроить пороговые значения измерений.

Раздел Уведомления, в котором Вы можете настроить оповещения о Ваших измерениях

Раздел Типы измерений поможет Вам настроить необходимые поля, которые Вы хотите использовать

В разделе Профиль Вы сможете настроить Свои персональные данные

Выбор языка отображения данных

Выход из Вашей учетной записи

Экспорт Ваших данных в формате, удобном для печати

Просмотр истории Ваших измерений

Настройка интервала автоматического обновления монитора

Раздел Монитор. Возможность просмотра необходимых видов измерений